

NICEWAY II

折り畳み車いす

取扱説明書

各部分名称



車いすの安全なご利用

車いすは正しく安全に使えば、利用者や介助者にとって大変便利な道具です。

以下の事項を守って正しく安全にお使いください。

①取扱説明書

取扱説明書には安全にご使用いただくために必要な注意事項や正しい使用方法が記載されています。

ご使用になる前に必ずよくお読みください。また、お読みになった後は大切に保存してください。

②日常の点検が必要です。

安全にお使いいただくために、使用する前に安全点検を行ってください。

③介助者が付き添ってください。

本車いすは自走式の車いすではありません。
必ず介助者が付き添ってご利用ください。

④乗降時のご注意

車いすから降りるときは、地面に足をつけて降りてください。
足置きペダルの上で立つと転倒の危険があります。

日常の点検について

車いすを使用前に安全のため各部の点検を必ず行ってください。

<装着品の確認>

- 背ベースシート、座ベースシートは、しっかりと広がっていますか？
- 足ベルトは、しっかりと取付けられていますか？
- 足置き部分は、しっかりと取付けられていますか？

<後車輪の確認>

- タイヤにキズがありませんか？
- 異物が刺さっていませんか？
- 変形していませんか？

<ブレーキの確認>

- ブレーキ及び車輪ロックは正しく作動しますか？
- ブレーキをかけた状態で後車輪が回転しませんか？

<肘掛けの確認>

- しっかりと固定されていますか？
- キズや亀裂等はありませんか？

<足置きペダルの確認>

- しっかりと固定されていますか？
- 足置きペダルがパタパタしていませんか？
- キズや亀裂等はありませんか？

<全体的な確認>

- ガタつきはありませんか？
- まっすぐに走りますか？
- 各部ボルトやナットが緩んでいませんか？





両方のハンドル部分を片方ずつ肘掛の方にカチッと音がするまで持ち上げてロックします。



上記画像のように両方のロックレバーが立ち、ロックされていることを確認してください。



この部分に足置きペダルを取り付け
ます。




同梱の足置きペダルのユニットを取り
出し、上記画像のようにロックレ
バーを引いた状態にします。



上記画像のように足置きペダルのユニットの穴の開いている部分を本体の出っ張り部分に差し込み、ロックレバーを放して本体側にきちんと倒します。



ロックレバーが上記画像のようになっていることを確認してください。もう片方も同じように作業します。

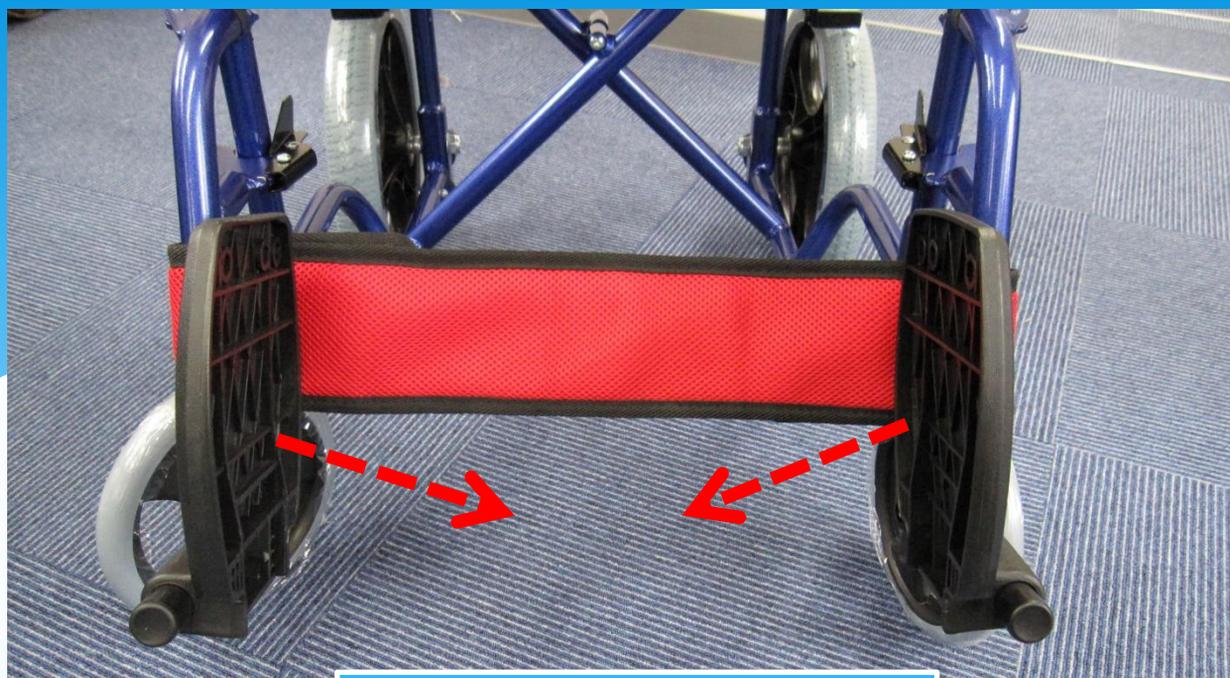

ペダル部分を内側に倒します。



ペダル部分が上記画像のようになっていることを確認してください。



シートベルト

上記画像が完成状態です。



ブレーキレバーを上引くとブレーキがかかります。



車輪ロックレバーを前に倒すと、
車輪がロックされます。



上記画像は車輪ロック状態です。
車輪をロックする場合は車輪を
両方ともロックしてください。
車輪ロックを解除する場合はレバーを
上方向に持ち上げます。

●保証について

保証期間

お買い上げ日より180日間(消耗部品は含みません。)

保証期間後

保証期間後は修理によって商品の機能が維持できる場合は、有料修理させていただきます。

消耗部品

- ・肘当てパッド
- ・前後輪(タイヤ)

保証の適用除外となる場合

- ・ご使用による消耗および取扱不注意による破損
例) タイヤの磨耗、シート破損、足置きペダルの破損等
- ・地震、台風、水害などの天災および事故、火災による焼失・破損
- ・お取扱の不注意、操作未熟ならびに故意または過失など誤って使用されたことによる破損
- ・一般に車いすが走行しない場所、または特殊な状態での使用による破損
- ・製品本来の使用目的にそぐわない使用による故障および破損
- ・取扱説明書に従わずに使用して生じた故障および破損
- ・取扱説明書に禁じられてる使用方法によって生じた故障

●修理のご依頼

異常がある場合は、ご使用を中止し弊社までご連絡ください。

一度使用したものは、原則として製品のお取り替えはできません。

保証とアフターサービス

よくお読みください

※下記の保証内容は商品をご購入いただいたお客様向けのものです。

保証書

この製品は、厳密な検査を経てお届けしたものです。お客様が取扱説明書等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に万一故障した場合に、本保証書記載内容により無料修理いたします。有効期間は、お買い上げの日より180日間です。

1. 修理は、下記の販売元にご依頼ください。修理に際してはお買い上げ日とお店等をお知らせください。

2. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

3. 保証期間内でも下記の場合は、有料修理になります。

(1)お買い上げ日やお店等が不明の場合

(2)使用上の誤り、あるいは改造、修理、調整による故障または損傷

(3)お買い上げ後の輸送、移動、落下、その他の不適切な取扱いによる故障または損傷

(4)火災、地震、塩害、ガス害、風水害、落雷、その他の天災地変による故障または損傷

(5)タイヤやブレーキ等消耗品の損傷及び汚れ

(6)業務用または一般家庭用以外にご使用の場合の故障または損傷

4. 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。

this warranty is valid only in japan.

5. 保証書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。したがって、保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

6. 初期不良を除き、修理の際のお客様から販売元への送料はお客様負担、販売元からお客様への送料は販売元負担といたします。

〈個人情報の取り扱いについて〉

(1)保証書にご記入いただいた住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動の為に利用いたします。

なお、本書にてお預かりするお客様の個人情報をお客様の同意を得ることなく、第三者に提供または開示いたしません。

(2)修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を委託する場合、守秘義務契約を結び当社と同等の水準でお客様の個人情報を取り扱うように管理致します。

★お買い上げ店名

★お買い上げ日 年 月 日 保証期間 お買い上げより180日

お客様 ご住所 〒

ご芳名 TEL

★輸入販売元 住所 〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1-8-10 神田THビル6階

フェニックス商事株式会社 TEL 03-3865-7470 メール info@phoenix-llc.co.jp

FAX 03-5823-4732 <http://px-online.net/>

(お電話でのお問い合わせの受付時間は平日10時～17時となります。)

★保証にはお買い上げ日とお買い上げ店(サイト名)等が必要ですので、お忘れなくご記入ください。