

# 折り畳み自走用車いす

## 取扱説明書

### 各部分名称



## 車いすの安全なご利用

車いすは正しく安全に使えば、利用者や介助者にとって大変便利な道具です。

以下の事項を守って正しく安全にお使いください。

### ①取扱説明書

取扱説明書には安全にご使用いただくために必要な注意事項や正しい使用方法が記載されています。

ご使用になる前に必ずよくお読みください。また、お読みになった後は大切に保存してください。

### ②日常の点検が必要です。

安全にお使いいただくために、使用する前に安全点検を行ってください。

### ③乗降時のご注意

車いすから降りるときは、地面に足をつけて降りてください。足置きペダルの上で立つと転倒の危険があります。

## 日常の点検について

車いすを使用前に安全のため各部の点検を必ず行ってください。

### <装着品の確認>

- 背ベースシート、座ベースシートは、しっかりと広がっていますか？
- 足ベルトは、しっかりと取付けられていますか？
- 足置き部分は、しっかりと取付けられていますか？

### <後車輪の確認>

- タイヤにキズがありませんか？
- 異物が刺さっていませんか？
- 変形していませんか？

### <ブレーキの確認>

- ブレーキ及び車輪ロックは正しく作動しますか？
- ブレーキをかけた状態で後車輪が回転しませんか？
- 1ヵ月に一度、ブレーキの利きを確認してください。

### <肘掛けの確認>

- しっかりと固定されていますか？
- キズや亀裂等はありませんか？

### <足置きペダルの確認>

- しっかりと固定されていますか？
- 足置きペダルがパタパタしていませんか？
- キズや亀裂等はありませんか？

### <全体的な確認>

- ガタつきはありませんか？
- まっすぐに走りますか？
- 各部ボルトやナットが緩んでいませんか？



車体を使用する際、車体のひじ掛け部分を外側に開き展開してください。赤丸で囲んだ取っ手部分が座面の側面に位置しています。



収納時は取っ手を持って上方向に力を入れるだけで折りたためます。

足置き部分を降ろし、展開してください。



両方のハンドル部分を片方ずつ肘掛の方にかちッと音がするまで持ち上げてロックします。



上記画像のように両方のロックレバーが立ち、ロックされていることを確認してください。

# 足置き部分の固定方法

下図部分のキャップを外します。



下図の付属部品を用意して下さい。  
付属品は背面のポケットに収納されています。



付属部品をキャップを取った部分に差し込みます。  
下図は途中までですが、奥まで差しこんで下さい。



足置き部分を降ろし、上図のように固定してください。

# 使用方法

解除用ハンドル及びブレーキ：  
介助者がつく場合、こちらのハンド  
ルで操作して下さい。

操作用車輪：左右の車輪を手で廻  
す事により、前進、後退、旋回が可  
能です。



搭乗者用ブレーキ：  
手前に引くとブレーキがかかり、前  
に倒すと解除されます。

# 収納方法

②左右のレバーを押すと座面が後ろへ倒れます。

③左右両方の取っ手を上に上げると座面及び本体が畳めます。



①足置きペダルを内側へ垂直に立て、脚を上げて下さい。

# よくあるご質問①

①ハンドブレーキは下図のように後ろに引くことによってかかります。



ブレーキOFF



ブレーキON

②背もたれの固定がゆるい、きつ過ぎる場合。



③ペロを止めているナットをレンチで締める、または緩めて調整してください。

症状は輸送時の『揺れ』が原因なので、気持ち程度少し回すだけで解決する場合があります。

## よくあるご質問②

### ③ 介助用ブレーキが効きすぎる、または緩い場合



← 進行方向



進行方向→

① 介助ブレーキは上図の○内バーとタイヤの位置関係によって効きやすさが変化します。

- ・効きすぎる場合はバーをタイヤから遠ざける
  - ・効きが悪い場合はバーをタイヤに近づける
- 事によって改善します。

② バーの位置調整はタイヤの後ろのナットを回すことによって調整できます。

- ・バーを遠ざける(効きすぎる)場合は①のナットを締めてください。
- ・バーを近づける(効きが悪い)場合は①のナットを緩めてください。

②のナットは微調整に使用してください。

# 保証とアフターサービス

よくお読みください

※下記の保証内容は商品をご購入いただいたお客様向けのものです。

## 保証書

この製品は、厳密な検査を経てお届けしたものです。お客様が取扱説明書等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に万一故障した場合に、本保証書記載内容により無料修理いたします。有効期間は、お買い上げの日より180日間です。

1. 修理は、下記の販売元にご依頼ください。修理に際してはお買い上げ日とお店等をお知らせください。

2. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

3. 保証期間内でも下記の場合は、有料修理になります。

(1)お買い上げ日やお店等が不明の場合

(2)使用上の誤り、あるいは改造、修理、調整による故障または損傷

(3)お買い上げ後の輸送、移動、落下、その他の不適切な取扱いによる故障または損傷

(4)火災、地震、塩害、ガス害、風水害、落雷、その他の天災地変による故障または損傷

(5)タイヤやブレーキ等消耗品の損傷及び汚れ

(6)業務用または一般家庭用以外にご使用の場合の故障または損傷

4. 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。

this warranty is valid only in japan.

5. 保証書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。したがって、保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

6. 初期不良を除き、修理の際のお客様から販売元への送料はお客様負担、販売元からお客様への送料は販売元負担といたします。

〈個人情報の取り扱いについて〉

(1)保証書にご記入いただいた住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動の為に利用いたします。

なお、本書にてお預かりするお客様の個人情報をお客様の同意を得ることなく、第三者に提供または開示いたしません。

(2)修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を委託する場合、守秘義務契約を結び当社と同等の水準でお客様の個人情報を取り扱うように管理致します。

★お買い上げ店名

★お買い上げ日                      年              月              日 保証期間 お買い上げより180日  
お客様 ご住所 〒

ご芳名

TEL

★輸入販売元 住所 〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1-8-10 神田THビル6階

フェニックス商事株式会社 TEL 03-3865-7470

メール [info@phoenix-llc.co.jp](mailto:info@phoenix-llc.co.jp)

FAX 03-5823-4732

<http://px-online.net/>

(お電話でのお問い合わせの受付時間は平日10時～17時となります。)

★保証にはお買い上げ日とお買い上げ店(サイト名)等が必要ですので、お忘れなくご記入ください。

FOLDING WHEELCHAIR  
NICEWAYⅢ  
MADE IN CHINA

輸入元

フェニックス商事株式会社

〒101-0024

東京都千代田区神田和泉町1-8-10 神田THビル6F

TEL: 03-3865-7470

FAX: 03-5823-4732

MAIL: [info@phoenix-llc.co.jp](mailto:info@phoenix-llc.co.jp)

<http://phoenix-llc.co.jp>

お電話でのお問い合わせ時間:

10:00～17:30(祝日を除く月曜日～金曜日)