


Nicewayシリーズ

シルバーカースマート

保証書付 **取扱説明書**

このたびはシルバーカーをお求めいただきまして、まことにありがとうございます。

- 正しくお使いいただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
- この取扱説明書は保証書付きです。大切に保管してください。
- 保証書は「お買い上げ日、販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

 ご使用になる前に

この製品は主として自立歩行できる高齢者が、より安定して歩行できるように補助的に使用するものです。手すり等の固定したものにつかまらなければ歩行できない人や介助者に手伝ってもらわなければ歩行できない人等には適しません。

加齢などによって、この製品が合わなくなり危険となる場合があります。

屋内の移動が困難になったり、屋外でも短距離の移動が困難になった場合には使用を中止してください。組立ては必ず、本説明書に記載されている順番で組立てをお願いいたします。



 シルバーカーに腰掛ける際のご注意

シルバーカーに腰掛ける際は、必ずブレーキロックしてから腰掛けるようにしてください。ブレーキロックせずに腰掛けると動いてしまい、事故やけがの原因になります。

主な各部のなまえ



シルバーカーの仕様

重量	約7.9KG	耐荷重	約90KG
ハンドル高	約73~86cm(6段階調整)	幅	約62cm
座面高	約45cm	奥行	約77cm
座面幅	横幅約42cm×奥行約22cm	車輪径	約20cm
カゴの大きさ	幅約35cm×奥行約20cm×高さ約20cm	折りたたみ時横幅	約38cm

梱包されている部品について

下記部品が入っていることを確認してください。




- ① 背もたれバンド
- ② ハンドル
- ③ 多目的利用バッグ
- ④ シルバーカー本体
- ⑤ 前輪 × 2
- ⑥ 背もたれバンド取付用アダプタ
- ⑦ 杖置き受け
- ⑧ 星印キャップ × 2
- ⑨ 六角ボルトネジ × 2

組立方法

●フレームを展開する



シルバーカー本体を上記のように置きます。

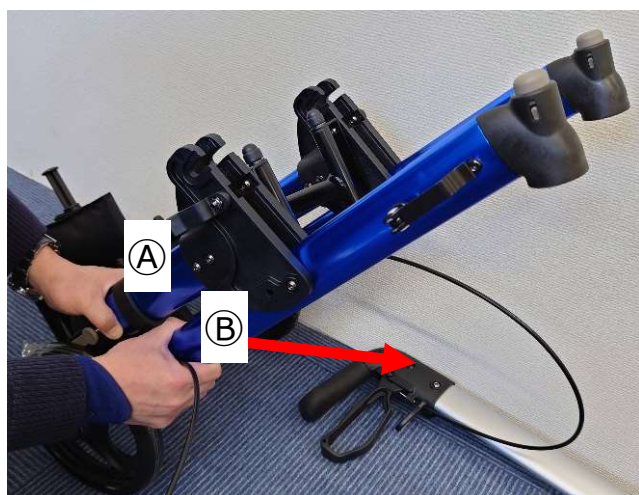


上記図の①部分のシルバーカーハンドル下フレームを持ちながら、
②のタイヤついているフレームを矢印の方向にロックされるまで開きます。

* 手を挟まないようお気を付けください。

組立方法

● 本体フレームを固定する

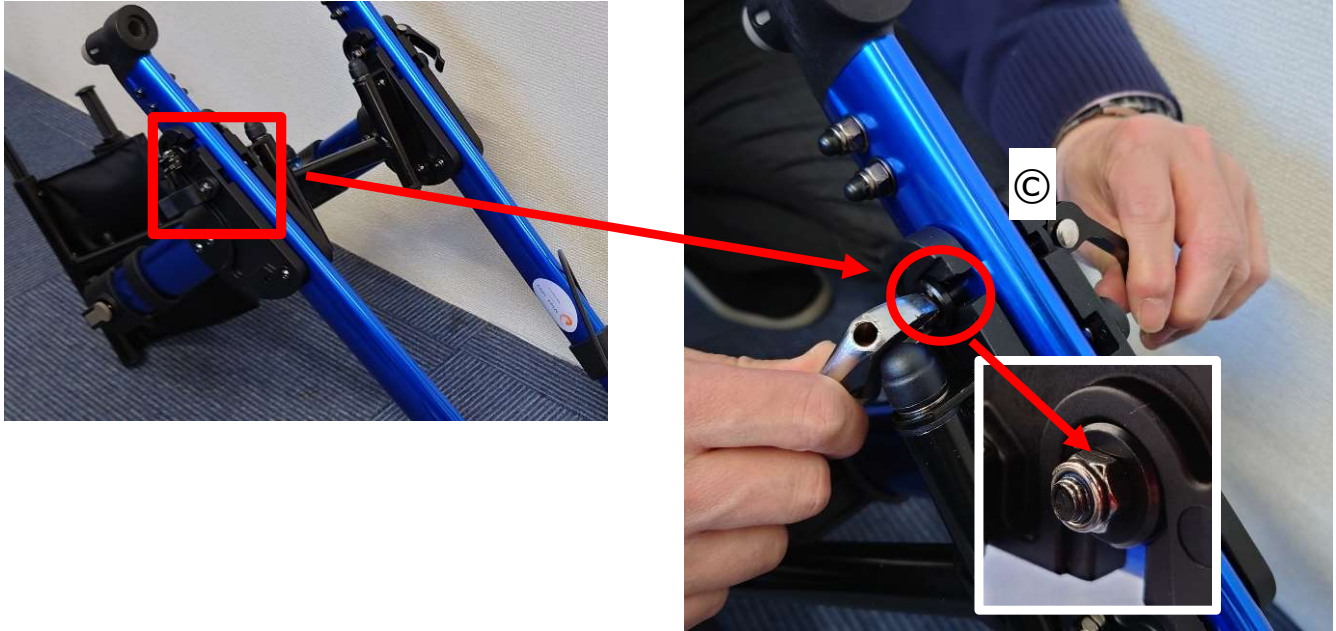

○印部分にある六角ナットをレンチ等で固定して◎のレバーを回して固定します。
固定しないと本体が安定しませんので、ご注意ください。

組立方法

● 本体に前輪を取り付ける

使用するもの



1、前輪の取付向きは○印部分の前輪の回転軸にあるネジの頭に穴が開いている方を本体の外側に来るようにします。



入りづらい場合は、先端の突起部分をマイナスドライバーなどで少し押しと入りやすくなります。

2、前輪取り付けネジを本体の○印部分の穴に対してまっすぐ垂直に差し込んでください。差し込む際にまっすぐ垂直な状態で少し左右に回すようにすると入りやすくなります。まっすぐ垂直に差し込まないと入りませんのでご注意ください。
固い場合がございますが、商品の仕様であり不良ではございません。

組立方法

●ハンドルを差し込む




使用するもの



シルバーカー本体にある○印のスイッチを押しながらハンドルを差し込みます。スイッチを押さないと内部にある突起が引っ込まないため差し込むことができません。

●ブレーキワイヤを固定する

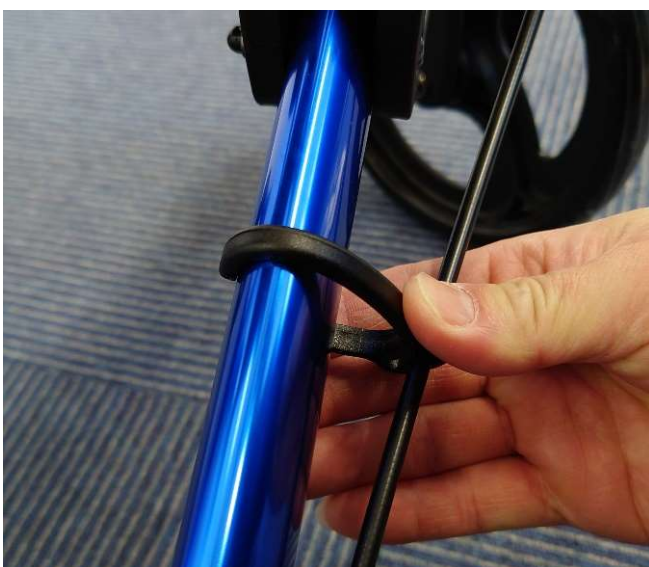

上図のようにブレーキワイヤ固定クリップを使用してフレームに取り付けます。ブレーキワイヤを固定しないと垂れ下がり危険ですので、必ず固定してください。

組立方法

- シルバーカー本体に背もたれバンドを取り付ける



使用するもの




シルバーカー前面



ハンドルステー銀色部分の上部に背もたれバンド固定具を取付します。
必ず六角形の穴が開いている側がハンドルの内側に来るように取り付けてください。

組立方法

●シルバーカー本体に背もたれバンド固定具を固定する

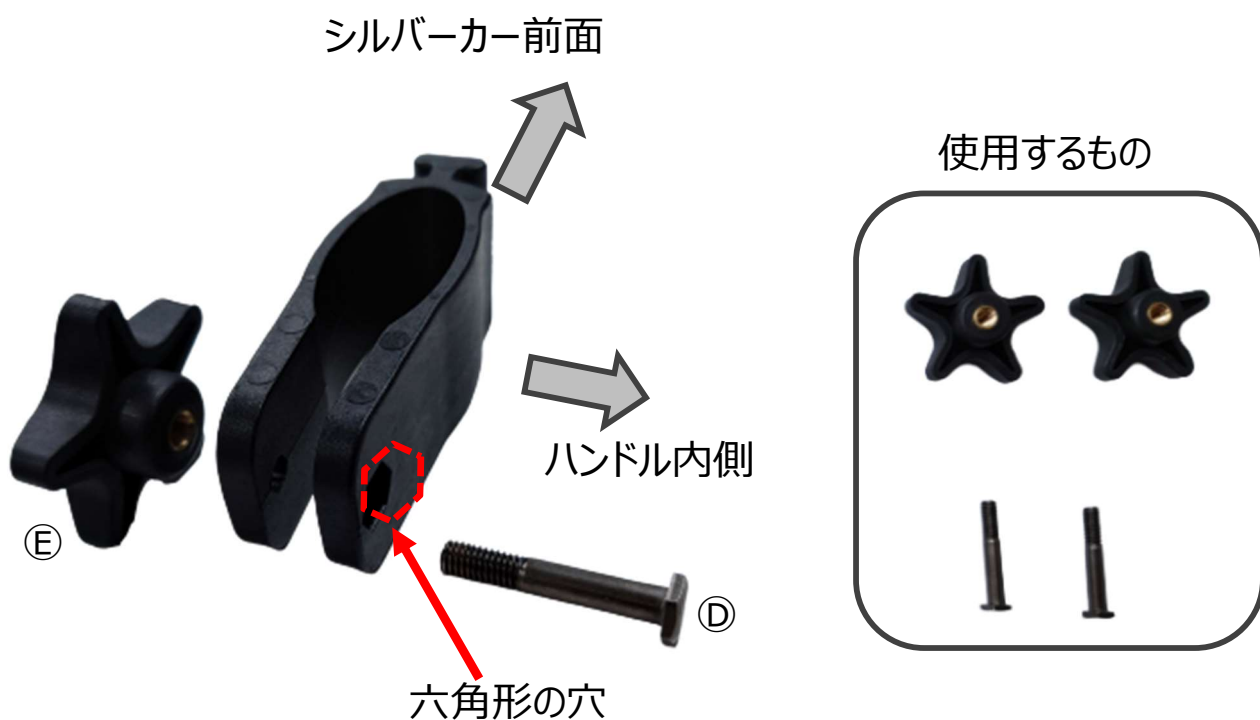

④の六角ボルトを六角形の穴の側から差し込み、六角形の穴に六角ボルトの頭がきちんとはまるように最後まで入れます。

⑤の星印キャップを六角ボルトの先端に入れて回してしっかりと固定します。

組立方法

●シルバーカー本体に多目的利用バッグを取り付ける



使用するもの



シルバーカー本体の前面にある○印部分のバーに多目的利用バッグ上部にある取り付け用の穴を通して取付けします。
その際、バック上部のチャックが前方に来るように取り付けします。




シルバーカー本体に多目的利用バッグを取り付けた状態

組立方法

●シルバーカー本体に背もたれバンドを取り付ける

使用するもの

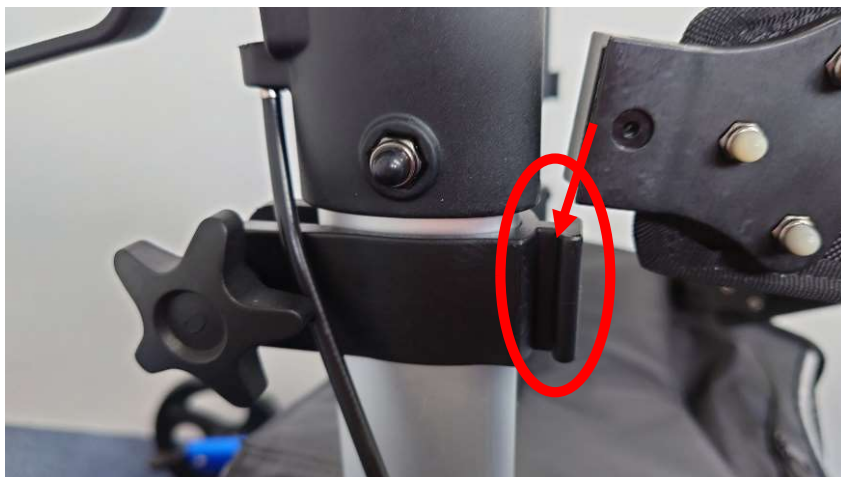

背もたれバンドの両端にある取り付け部をシルバーカー本体の○印部分の背もたれバンド固定具の凸部分に上から差し込むように取り付けます。

●杖置き受けを取り付ける *杖ご利用でない場合は取付不要です

使用するもの



杖置きは左側のハンドル下にあります。



杖置き受け取り付け場所はさらにその下の方にあります。
杖置き受けを○印の部分に差し込んで取り付けます。


シルバーカー展開・折畳方法

●シルバーカーを展開する（使用する状態にする）



シルバーカーのハンドルを左右に広げると本体が左右に展開します。
ある程度展開しましたら座席の両端部分を同時に押し下げるとロックされます。

●シルバーカーを折畳する

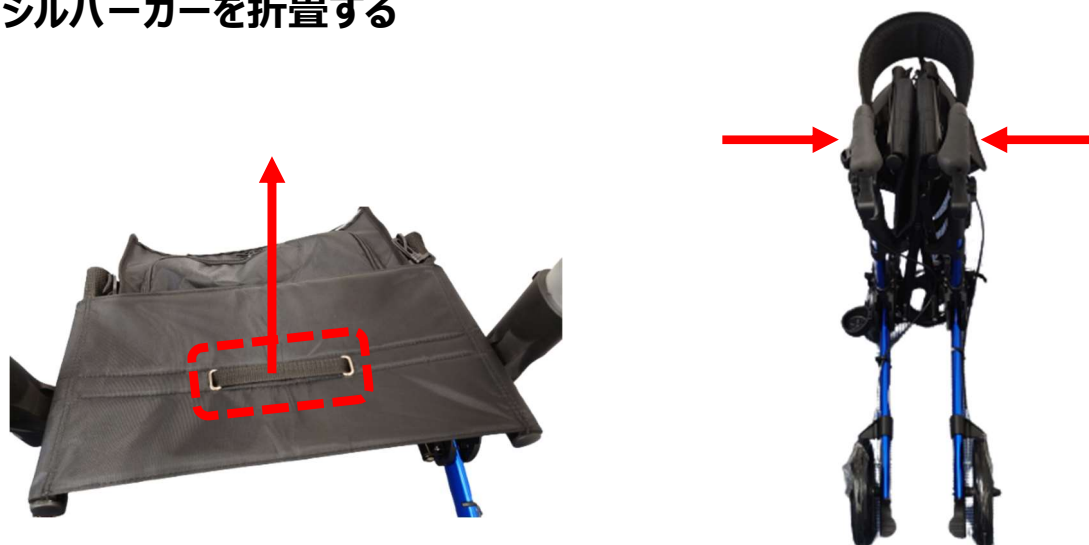

座席にある取っ手を上に引くと本体が内側に折畳されます。
ある程度折畳されましたらハンドルを内側に寄せると折畳まれます。

注意 ⚠

シルバーカーを使用する場合は必ず完全に展開した状態で使用してください。
完全に展開しない状態で使用すると事故やけがの原因になります。
折畳される場合は多目的利用バッグの中に物が入っていないことを確認してください。
破損やけがの原因になります。

操作方法

●ブレーキをかける



ブレーキレバーを上方向に引くと引いている間、ブレーキが効きます。
ブレーキレバーを離すとブレーキが解除されます。

●ブレーキをロックする



ブレーキレバーを下方方向にロックされるまで押し下げるとブレーキがロックされます。
ブレーキレバーを上方向に引くとブレーキロックが解除されます。

注意 ⚠


シルバーカーに腰掛ける際は必ず、ブレーキロックしてから腰掛けるようにしてください。
ブレーキロックをせずに腰掛けると動いてしまい、事故やケガの原因になります。

ハンドル高さ調整方法




ハンドル高さ調整は○印部分のボタンを押しながらハンドルの高さ調整を行います。ハンドル高さは73～86cmの間で、6段階に調整することができます。

●ハンドルを位置を高くする

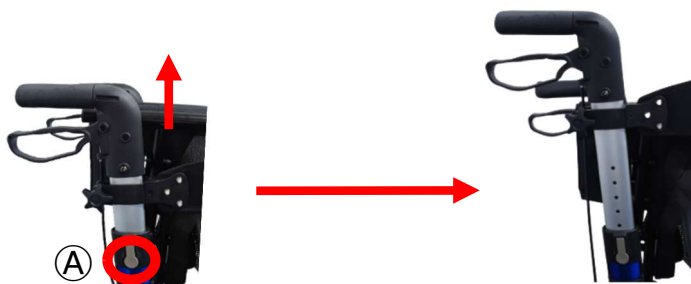

①のボタンを押しながらハンドルを上引き上げます。「カチッ」と音がするとロックされたこととなります。

●ハンドルを位置を低くする

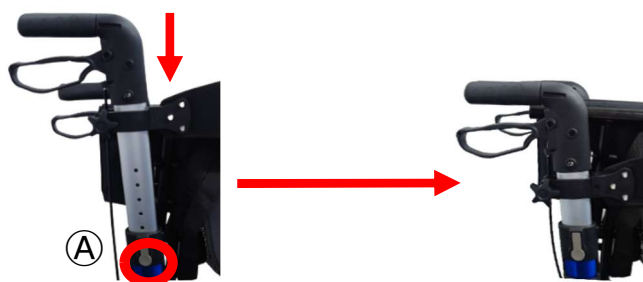

①のボタンを押しながらハンドルを下押し下げます。「カチッ」と音がするとロックされたこととなります。


注意 ⚠

ハンドル高さ調整後はハンドルがロックされていることを確認してから使用してください。ロックをせずに使用すると事故やケガの原因になります。

ブレーキの調整方法




ブレーキ調整は後輪付近にある○印部分のブレーキ調整ナットで行います。

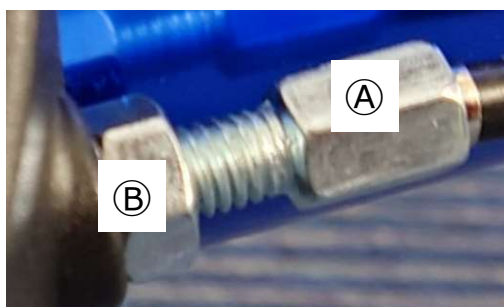

①のナットを固定しながら②のナットを回してブレーキ調整を行います。

①のナットを固定しながら②のナットを時計回りに回すとブレーキシューが後輪に近づき、ブレーキが強効きます。

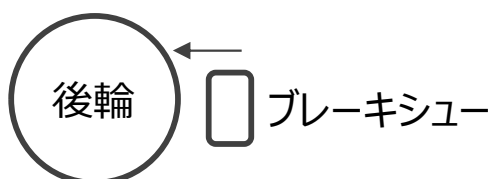

反時計回りに回すとブレーキシューが後輪から離れてブレーキが弱くなります。



注意

ブレーキシューが後輪に近づきすぎるとブレーキが後輪に干渉して動かしづらくなります。ブレーキシューが後輪から離れすぎるとブレーキが効かなくなりますのでご注意ください。

本商品の機能と特徴

- ・医療機器メーカーが開発したシルバーカー
- ・アルミニウムフレーム構造
- ・多目的利用バッグ
- ・背もたれ付きシート
- ・折り畳み可能
- ・ブレーキとロック機能
- ・杖置き場付き



メンテナンスについて

- ・ブレーキ調整ナットの状態を定期的にチェックして下さい。
- ・ブレーキシューの減り具合の確認を常にして下さい。

輸入元

フェニックス商事株式会社

〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1-8-10 神田THビル6F

TEL: 03-3865-7470

FAX: 03-5823-4732

MAIL: info@phoenix-llc.co.jp

<https://phoenix-llc.co.jp>

お電話でのお問い合わせ時間：

10:00～17:30(祝日を除く月曜日～金曜日)

※下記の保証内容は商品をご購入いただいたお客様向けのものです。

保証書

この製品は、厳密な検査を経てお届けしたものです。お客様が取扱説明書等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に万一故障した場合に、本保証書記載内容により無料修理いたします。

有効期間は、お買い上げの日より1年間です。

1. 修理は、下記の販売元にご依頼ください。修理に際してはお買い上げ日とお店等をお知らせください。

2. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

3. 保証期間内でも下記の場合は、有償修理になります。

(1)お買い上げ日やお店等が不明の場合

(2)使用上の誤り、あるいは改造、修理、調整による故障または損傷

(3)お買い上げ後の輸送、移動、落下、その他の不適切な取扱いによる故障または損傷

(4)火災、地震、塩害、ガス害、風水害、落雷、その他の天災地変による故障または損傷

(5)タイヤやブレーキ等消耗品の損傷及び汚れ

(6)業務用または一般家庭用以外にご使用の場合の故障または損傷

4. 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。

this warranty is valid only in japan.

5. 保証書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。したがって、保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

6. 初期不良を除き、修理の際のお客様から販売元への送料はお客様負担、販売元からお客様への送料は販売元負担といたします。

〈個人情報取り扱いについて〉

(1)保証書にご記入いただいた住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動の為に利用いたします。

なお、本書にてお預かりするお客様の個人情報をお客様の同意を得ることなく、第三者に提供または開示いたしません。

(2)修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を委託する場合、守秘義務契約を結び当社と同等の水準でお客様の個人情報を取り扱うように管理致します。

★お買い上げ店名

★お買い上げ日 年 月 日 保証期間 お買い上げより1年間
お客様 ご住所 〒

お名前

TEL

★輸入販売元 住所 〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1-8-10 神田THビル6階

フェニックス商事株式会社 TEL 03-3865-7470 メール info@phoenix-llc.co.jp

FAX 03-5823-4732 <https://px-online.net/>

(お電話でのお問い合わせの受付時間は平日10時～17時となります。)

★保証にはお買い上げ日とお買い上げ店（サイト名）等が必要ですので、お忘れなくご記入ください。