

**保証書付 取扱説明書**

このたびは歩行器をお求めいただきまして、まことにありがとうございます。

- 正しくお使いいただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
- この取扱説明書は保証書付きです。大切に保管してください。
- 保証書は「お買い上げ日、販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

**警告** ご使用になる前に

この製品は歩行を補助する製品です。両手で身体を支えることができない方は使用できません。  
ご使用される方の状態により、医師やケアマネージャーなどの専門家にご相談ください。  
ご使用される方の体格にあったハンドルの高さでご使用ください。  
ご使用前に取扱説明書をご熟読いただき、ご理解された後にご使用ください。

**安全上のご注意** 必ずお守りください

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他人への危害を未然に防止するためのものです。安全に関する重要な内容ですので必ずお守りください。

**警告**

誤った使い方をすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

**注意**

誤った使い方をすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

**安全上のご注意 必ずお守りください**

お守りいただきたい内容を区分して説明しています。

**警告****必ず実行してください**

- ご使用前に必ず各部を点検して異常のないことを確認してからご使用ください。  
各部の点検 ・ワンタッチスイッチが正常に操作でき、ロックがかけられること。  
・ハンドルグリップや高さ調整ピンが確実に固定されていること。  
・クロスバーが正しく展開されていること。  
・キャスター部分が正常に稼働すること。  
・各部のねじにゆるみがないこと。
- 歩行する際はグリップ以外を持って使用しないでください。フレーム等が変形してけがの原因になります。
- ワンタッチスイッチ部分に腰をかけたり強い加重をかけないでください。フレーム等が変形したり、転倒しけがや重傷の原因になります。
- 偏った使い方をしないでください。転倒し、けがや重傷につながる恐れがあります。歩行する際は、必ず左右均等に体重がかかるようにしてください。

**警告****してはいけない禁止事項**

- 平らな場所で使用してください。平らでない場所で使用されると、傾いて転倒したり、フレームの変形の原因となり、けがや重傷につながる恐れがあります。
- 階段や段差のある場所では使用しないでください。体が不安定になり事故の原因になります。
- 固定されていない敷物の上や滑りやすい場所では使用しないでください。事故の原因となります。
- 高さ調整は左右両方とも同じ位置に合わせてご使用ください。高さが違うと不安定になり事故の原因になります。
- 歩行器を投げたり落としたり強い衝撃を与えないでください。フレームが変形し事故の原因になります。
- 使用中にガタつきや異常が生じた場合は、直ちに使用を中止し販売店または当社窓口までご連絡ください。大きな事故につながる恐れがあります。
- この製品の最大使用者体重は100kgまでです。

**お手入れの方法****■清掃について**

汚れがひどいときは中性洗剤または濡れた布で汚れを落として乾いた布でよく拭き取ってください。濡れたままで放置すると変色や痛むことがありますので、乾かすようにしてください。

**注意**

- 歩行器の清掃に中性洗剤以外の洗剤を使用しないでください。部品の変質や劣化の原因になります。

**■点検について**

グリップの摩耗、ねじのゆるみ、部品破損、動作不良がないか適時点検し、必要に応じて交換してください。

**警告**

- 歩行器の破損や異常を発見した場合は、直ちに使用を中止し、当社のお客様ご相談窓口までご連絡ください。重大な事故につながる恐れがあります。

**注意**

- 交通量の多い場所や人の出入りが頻繁な場所は避けるか、介護の方が付き添ってください。
- 危険ですから絶対に改造や分解をしないでください。故障やけがの恐れがあります。

## 主な各部のなまえ



## 歩行器の仕様

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 高さ調整 | 約81-98cm(6段階調整)       |
| 横幅   | 約62cm                 |
| 奥行   | 約62cm                 |
| 折畳時  | 約89×13×18cm(高さ×横幅×奥行) |
| 耐荷重  | 100KGまで               |
| 重さ   | 約3KG                  |

## 展開・折畳方法

### 展開方法(使用時)



### 折畳方法(収納時)




**警告**

●使用時は必ず完全に展開した状態で使用してください。  
重大な事故につながる恐れがあります。

## ハンドルグリップ高さ調整方法

ハンドルグリップ高さ調整について

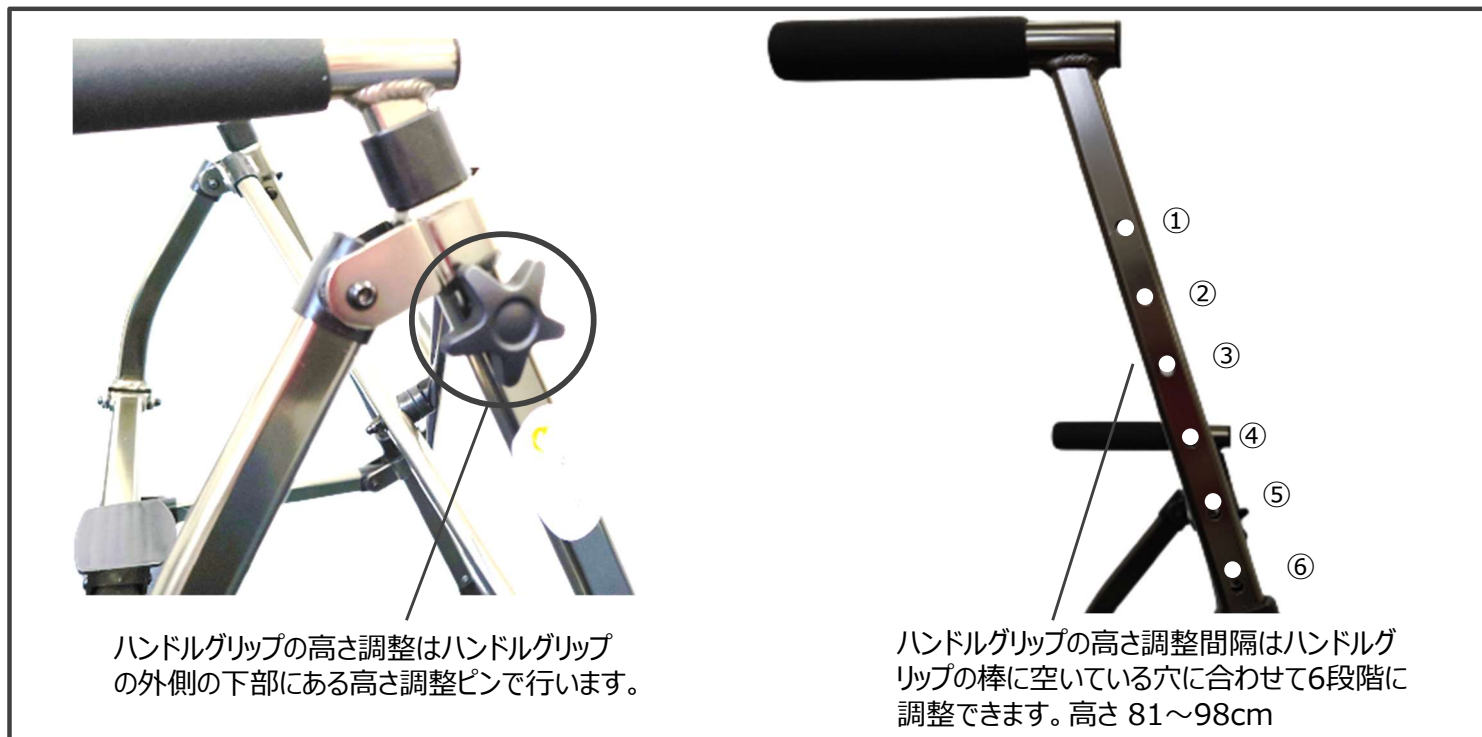

### ハンドルグリップ高さ調整方法 必ず展開している状態で調整を行ってください



**警告**

- 使用時は必ずハンドルグリップは左右同じ高さで使用してください。
- ハンドルグリップ固定ピンはしっかりと固定して使用してください。重大な事故につながる恐れがあります。

## 本商品の機能と特徴

- ・リハビリセンターからの要請により医療機器メーカーが開発した次世代型歩行器
- ・クロスバー方式採用で軽さと丈夫さの共存を実現
- ・前脚のキャスターで歩くをサポート



## メンテナンスについて

- ・各部ねじにゆるみがないか定期的にチェックして下さい。
- ・前脚のキャスターや後脚のすべり止めゴムの減り具合の確認を常にして下さい。

---

### 輸入元

フェニックス商事株式会社

〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1-8-10 神田THビル6F

TEL: 03-3865-7470

FAX: 03-5823-4732

MAIL: [info@phoenix-llc.co.jp](mailto:info@phoenix-llc.co.jp)

<https://phoenix-llc.co.jp>

お電話でのお問い合わせ時間：

10:00～17:30(祝日を除く月曜日～金曜日)

※下記の保証内容は商品をご購入いただいたお客様向けのものです。

## 保証書

この製品は、厳密な検査を経てお届けしたものです。お客様が取扱説明書等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に万一故障した場合に、本保証書記載内容により無料修理いたします。

有効期間は、お買い上げの日より1年間です。

1. 修理は、下記の販売元にご依頼ください。修理に際してはお買い上げ日とお店等をお知らせください。

2. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

3. 保証期間内でも下記の場合は、有償修理になります。

(1)お買い上げ日やお店等が不明の場合

(2)使用上の誤り、あるいは改造、修理、調整による故障または損傷

(3)お買い上げ後の輸送、移動、落下、その他の不適切な取扱いによる故障または損傷

(4)火災、地震、塩害、ガス害、風水害、落雷、その他の天災地変による故障または損傷

(5)タイヤやブレーキ等消耗品の損傷及び汚れ

(6)業務用または一般家庭用以外にご使用の場合の故障または損傷

4. 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。

this warranty is valid only in japan.

5. 保証書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。したがって、保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

6. 初期不良を除き、修理の際のお客様から販売元への送料はお客様負担、販売元からお客様への送料は販売元負担といたします。

〈個人情報取り扱いについて〉

(1)保証書にご記入いただいた住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動の為に利用いたします。

なお、本書にてお預かりするお客様の個人情報をお客様の同意を得ることなく、第三者に提供または開示いたしません。

(2)修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を委託する場合、守秘義務契約を結び当社と同等の水準でお客様の個人情報を取り扱うように管理致します。

★お買い上げ店名

★お買い上げ日                      年              月              日 保証期間 お買い上げより1年間  
お客様 ご住所 〒

お名前

TEL

★輸入販売元 住所 〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1-8-10 神田THビル6階

フェニックス商事株式会社 TEL 03-3865-7470      メール [info@phoenix-llc.co.jp](mailto:info@phoenix-llc.co.jp)

FAX 03-5823-4732      <https://phoenix-llc.co.jp>

(お電話でのお問い合わせの受付時間は平日10時～17時となります。)

★保証にはお買い上げ日とお買い上げ店（サイト名）等が必要ですので、お忘れなくご記入ください。